

Alveolitis sicca?  
Lindern Sie den  
Schmerz.



***Alveogyl***  
Medikamentöse Einlage



Alveogyl ist bei einer Alveolitis sicca die ideale medikamentöse Einlage, die schnell Schmerzen Ihrer Patienten lindert und einfach anzuwenden ist. Alveogyl kann auch als Einlage nach Zahnextraktionen verwendet werden.

Alveogyl wird einmalig appliziert, ist selbstentfernend und bedarf außer der Beobachtung des Heilungsprozesses weder einer Naht noch besonderer Nachbehandlungen.

Alveogyl wirkt beruhigend auf das alveoläre Wundgewebe und sorgt für eine rasche Schmerzlinderung. Die faserige Konsistenz der Penghawar-Fasern ermöglichen das einfache Auffüllen der Alveole und eine gute Adhäsion an der Alveolenwand.

Eigenschaften	Vorteile	Nutzen
Enthält Penghawar-Fasern	Faserige Konsistenz	Gute Adhäsion an der Alveolenwand während des gesamten Heilungsverlaufs
Einlage bei Alveolitis sicca	Kompression unterstützt die Hämostase	Lindert schnell den Schmerz und schützt vor einer Superinfektion
Keine Naht erforderlich	Beobachtung des Heilungsverlaufs, keine spezielle Nachbehandlung	Praktisch und einfach anzuwenden
Selbstentfernend	Ein-Schritt Behandlung	Keine Recall-Termine nötig

## Indikationen

Alveogyl ist eine medikamentöse Paste zur Einlage bei einer Alveolitis sicca oder nach einer komplizierten oder traumatischen Zahnextraktion bei Patienten mit bekannter Neigung zu einer Alveolitis sicca.

## Gebrauchsempfehlung

- Entnehmen Sie eine kleine Portion (ca. 0,20 g) Alveogyl Paste.
- Applizieren Sie Alveogyl vorsichtig in die präparierte Alveole.
- Keine Naht legen.



## Produktinformation

10 g Dose

Alveogyl ist über Ihren Dentalhandelspartner erhältlich.

### Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland  
 Telefon: +49 (0) 228 971 26-0, Fax: +49 (0) 228 971 26-66  
 E-Mail: [info@septodont.de](mailto:info@septodont.de)

[www.septodont.com](http://www.septodont.com)

