




Racegel

Gel zur Vorbereitung der Gingiva



Racegel ist das einzige Gel mit reversiblen Thermoeffekt zur Vorbereitung der Gingiva.

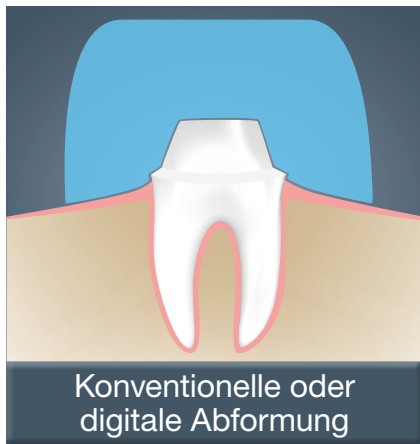


Adstringierender Effekt

- Kontraktion des Weichgewebes durch 25 % Aluminiumchlorid-Anteil
- Optimale Kontrolle der Blutung ohne Verfärbung der Gingiva
- Zusätzliche Mittel zur Blutstillung sind nicht erforderlich
- Einfacher Zugang zu subgingivalen Rändern
- Sauberer und trockener Arbeitsbereich




Atraumatische Vorbereitung der Gingiva

- Von flüssigem zu dickflüssigem Gel – einzigartige Viskosität mit Thermoeffekt:
 - Racegel hat in der Spritze bei Raumtemperatur (20 °C) eine niedrige Viskosität und ist nahezu flüssig.
 - In Kontakt mit Oralgewebe (35 °C) und somit steigender Temperatur erhöht sich die Viskosität von Racegel und nimmt eine gelartige Konsistenz an.

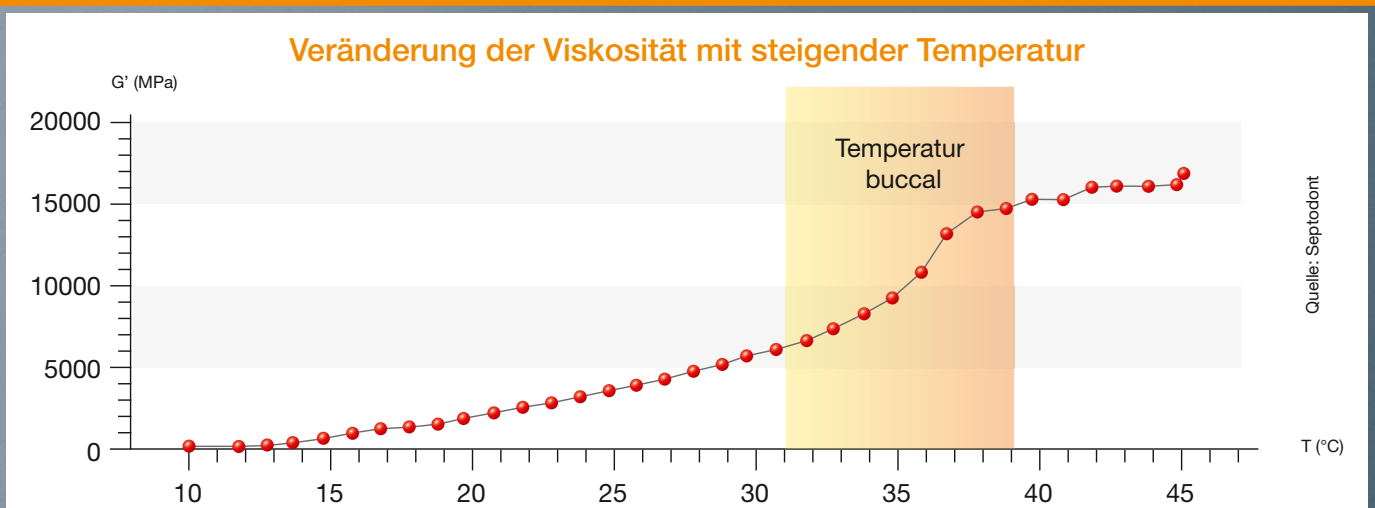

Einfache, schnelle und präzise Anwendung

- Ready-to-use-Spritzen mit vorgebogenen Applikationsspitzen
- Leichte Einführung des Gels in den Sulkus
- Gel läuft und tropft nicht weg während des Auftrags
- Orangefarben für eine gute Sichtbarkeit des Gels

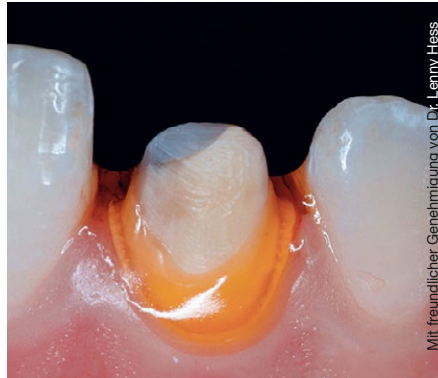


Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lenny Hess




Bei tiefer liegenden subgingivalen Rändern optional auch mit Retraktionsfaden anwendbar

Schnell und sicher abzuspülen

- Viskosität mit reversiblen Thermo-Effekt:
 - Die Viskosität von Racegel sinkt beim Abspülen mit kaltem Wasser
 - Keine Mikroverletzung, keine Nachblutung nach dem Abspülen von Racegel

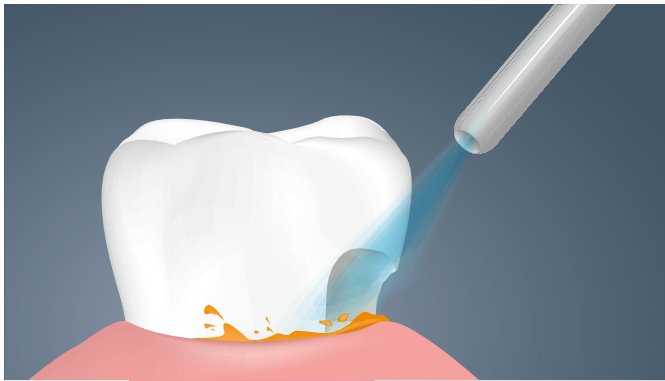

Präzise Abformung trotz minimaler Verdrängung

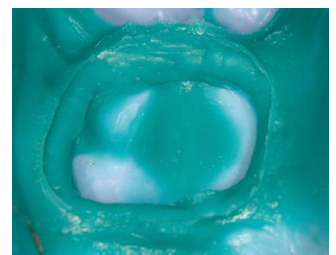

Die Gingiva wird minimal zur präzisen Wiedergabe der cervikalen Ränder verdrängt – dennoch werden hochwertige Ergebnisse bei der Abformung erzielt.

Racegel

Der effiziente Weg zur Vorbereitung der Gingiva

| Racegel vs. Retraktionspasten | Racegel vs. Hämostatische Lösungen | Racegel vs. Retraktionsfäden |
|---|---|---|
| keine zusätzlichen hämostatischen Mittel erforderlich | Gel bleibt stabil, fließt und tropft nicht weg | einfacher und schneller zu platzieren |
| gewährleistet präzise Abformungen mit minimaler Verdrängung der Gingiva | keine Verfärbung der Gingiva | verursacht bei Entfernung keine Nachblutung |
| keine zusätzlichen Applikationshilfen erforderlich | gewährleistet präzise Abformungen mit minimaler Verdrängung der Gingiva | gewährleistet präzise Abformungen mit minimaler Verdrängung der Gingiva |
| Himbeergeschmack sorgt für mehr Patientenakzeptanz | komfortables System mit Ready-to-use Spritzen | erhält die natürliche Struktur des Saumepithels |



Packungsinhalt

3 Spritzen und 30 vorgebogene Applikationsspitzen
Racegel erhalten Sie über Ihren Dentalhandelspartner.

Besuchen Sie uns auch auf    

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland

Telefon: +49 (0) 228 97126-0, Fax: +49 (0) 228 97126-66

E-Mail: info@septodont.de

www.septodont.de

