


Biodentine™ XP

BEDIENUNGSANLEITUNG

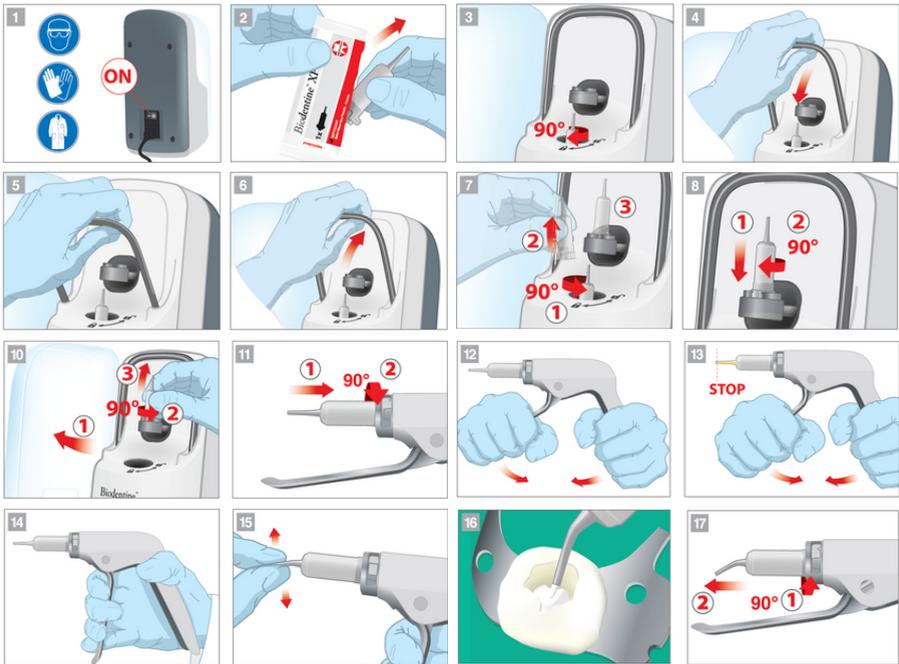

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich die 4-Schritte-Anleitung an.



Biodentine™ XP

Biodentine XP Hochleistungsmixer

DESINFEKTION UND REINIGUNG

Bitte trennen Sie vor der Reinigung des Geräts zu Ihrer eigenen Sicherheit das Netzkabel vom Stromnetz.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Geräts und des Netzkabels ein herkömmliches Wischdesinfektionsmittel.

Verwenden Sie KEINE scheuernden Reinigungsmittel, weil sie die Kunststoffkomponenten beschädigen könnten.

LAGERUNG

Bei -5 °C bis 40 °C und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.



Biodentine XP Applikationspistole



DESINFEKTION UND REINIGUNG

Mit Vakuum-Autoklav Typ B, kompatible Sterilisationsbeutel Methode: Biodentine™ Gun in einem geeigneten Sterilisationsbeutel verpacken.

Maximale Einwirktemperatur: 135 °C (275 °F)

Einwirkdauer 3,5-5 Minuten,

maximale Einwirkdauer: 18 Minuten

INSPEKTION UND WARTUNG

Alle Oberflächen einer Sichtprüfung unterziehen. Wenn immer noch Verschmutzungen sichtbar sind, muss der Aufbereitungsschritt wiederholt werden.